

# LIGHTMAN TRAVEL

---

**04-018-2**

**Manuālais pavadoņa vadāmais riteņkrēsls**

Lietošanas un kopšanas instrukcija



Pirms lietojiet, lūdzu izlasiet uzmanīgi lietošanas un kopšanas instrukciju!

## SATURS

Ievads/Pielietojums/Vispārējās piezīmes .....	3
Izmantotie simboli /Iesaiņojuma saturs .....	4
Komplektācijas daļas.....	6
Riteņkrēsla savākšana un izjaukšana .....	7
Lietošana .....	8
Drošība .....	10
Transportēšana/Uzkopšana/Rezerves daļas .....	14
Roku atbalsti/Bremzes.....	15
Aizmugurējās bremzes / Kāju atbalsti .....	16
Garantijas nosacījumi .....	17
Specifikācijas .....	18
Garantijas karte .....	20



## IEVADS

Cienījamais Klients, sirsnīgi pateicamies par Kid-Man riteņkrēsla iegādāšanos. Katrs riteņkrēsls tiek pārbaudīts, tāpēc Jūs sasniegs tikai kvalitatīvie ražojumi.

## PIELIETOJUMS

Riteņkrēsls ir paredzēts, lai pārvadātu cilvēkus ar pagaidu vai ilgtermiņa mobilitātes problēmām. Riteņkrēslam nav vadošu riteņu, tāpēc ir nepieciešams pavadošā persona. To var izmantot gan telpās, gan ārā.

## VISPĀRĒJĀS PIEZĪMES

Riteņkrēsli LightMan Travel tiek piegādāti kartona iesaiņojumā, gatavi ekspluatācijai. Pēc izsaiņošanas, lūdzu, saglabājiet kartona iesaiņojumu, ja tas ir iespējams. Jums, iespējams, vajadzēs aizsūtīt krēslu atpakaļ, ka arī krēsla glabāšanai. Tiklīdz jūs saņemat krēslu, lūdzu pārbaudiet, vai prece nav bojāta transportēšanas laikā. Ja jūs redzat bojājuma pazīmes, uzreiz atzīmējiet to transporta kompānijas pavaddokumentā. Lūdzu, pārbaudiet iesaiņojuma saturu, un, ja trūkst jebkāda no zemāk minētiem preces daļām, lūdzam uzreiz paziņot par to jūsu pārdevējam.

Jūs varat noteikt jūsu krēsla modifikāciju balstoties uz firmas uzlīmi uz sānu plates zem parocēm un uz metāliskas X-veida rāmja zem sēdekļa. Apaļa uzlīme ar skaitli (piemēram 38) uz plates zem paroces norāda, ka jūsu krēsla izmērs (sēdekļa platums) 38 cm.


## IZMANTOTIE SIMBOLI



**Uzmanību!** Šī zīme tiek izmantota sakarā ar svarīgiem momentiem, kas attiecas uz jūsu drošību! Lūdzu apskatīt ekspluatācijas instrukciju.

## IESAIŅOJUMA SATURS


1. 1 x riteņkrēsls saliktajā stāvoklī
2. 1 x spilvens
3. 1 x kāju balsti, 1 pāris
4. 1 x pumpis
5. 1 x instrukcija
6. 1 x instrumenti regulēšanai

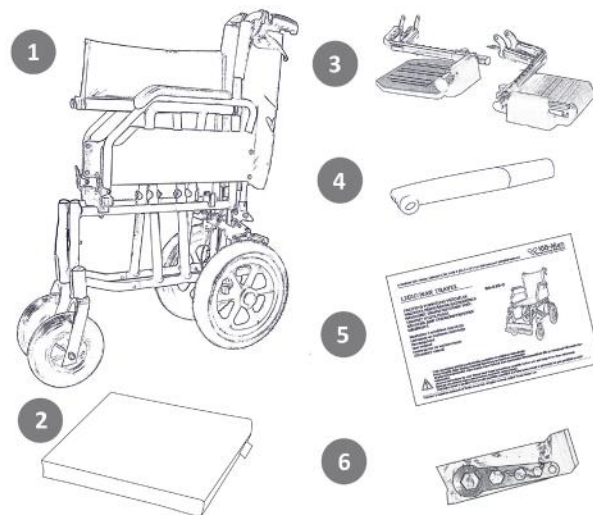



1. Nosaukums
2. Modelis
3. Sēdekļa platums
4. Maksimālā slodze
5. Ražotājs
6. Kontakti
7. Sērijas numurs

## KOMPLEKTĀCIJAS DAĻAS

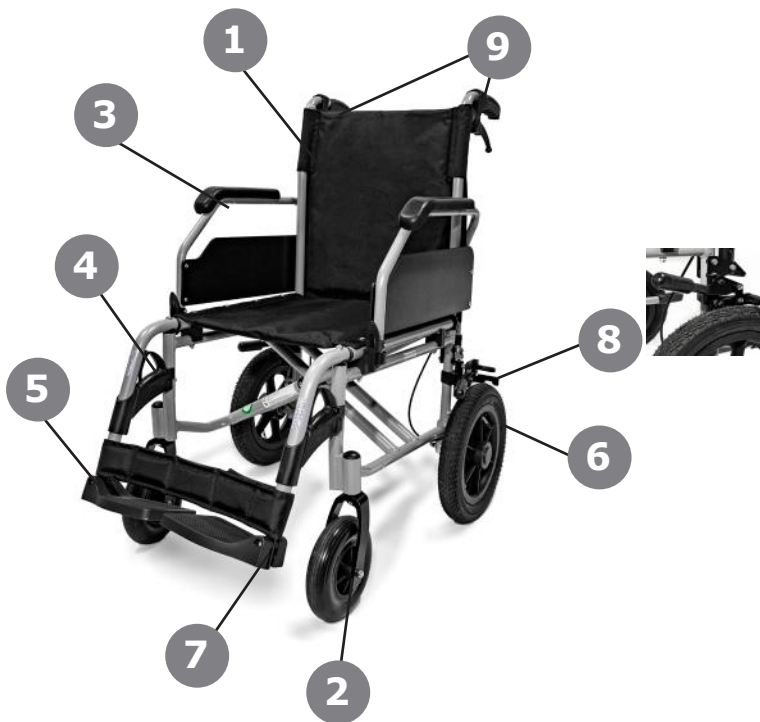

1. Atzveltne
2. Priekšējais riteniņš
3. Roku balsts
4. Kāju balsta pagrieziņa svira
5. Kāju balsts
6. Aizmugurējais ritenis
7. Papēža sikсна
8. Pavadoņa bremžu sviras
9. Pavadoņa rokturi




**Uzmanību!** Pastāvīgās produkta pilnveidošanas dēļ, jūsu riteņkrēsla, komplektācijas daļas var atšķirties no lietošanas instrukcijā attēlotām



## RITENKRĒSLA SAVĀKŠANA UN IZJAUŠANA



Lai saliktu riteņkrēslu, uzspiediet ar rokām uz sēdekļa sāniem. Un spiediet uz leju līdz fiksācijai plastikāta turekļos. Sēdekļa virsmai ir jābūt sastaipītai. Lai izjauktu riteņkrēslu, sakumā noņemiet kāju balstus, vai paceliet uz augšu kāju plāksnes. Pēc tām stiepiet uz augšu sēdekļa virsmu ar abām rokām, turoties aiz tā priekšas un pakalējas daļas pa vidū. Transportēšanai automobilī mēs iesākam aizmugurējus riteņus noņemt nost. (Att. Nr.1) Nospiediet uz izņemamo ass un izvelciet ārā aizmugurējo riteņi. Bīstami! Neleciet pirkstus riteņkrēsla rāmja iekšā! Pirksti var iesprūst!

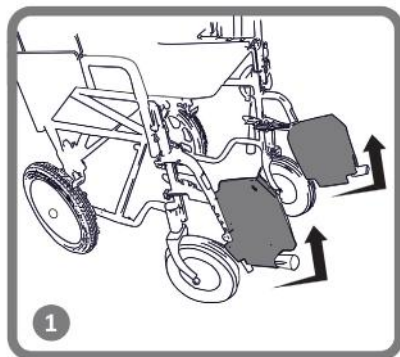

Att. Nr. 1

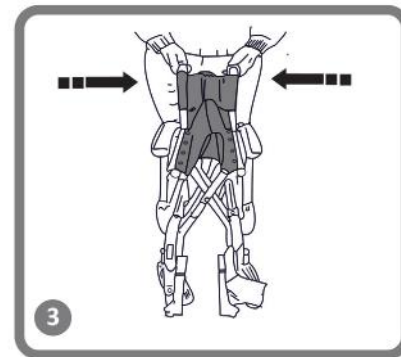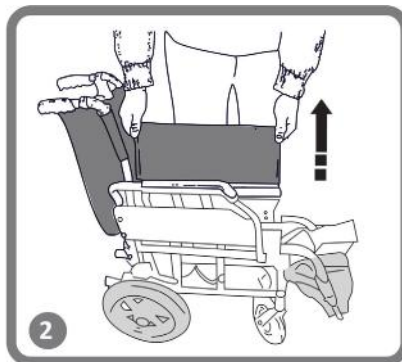

## LIETOŠANA

Lai lietošana būtu pareiza un droša, lietojot riteņkrēslu, iesakām ievērot drošības noteikumus. Šis riteņkrēsls ir izstrādāts, lai nodrošinātu stabilitāti, atrodoties sēdus stāvoklī. Ikviena kustība riteņkrēslā ietekmē smaguma punktu, kas var izraisīt riteņkrēsla apgāšanos. Lai palielinātu drošību, jūs varat izmantot drošības jostu.

## PRIEKŠMETA AIZSNIEGŠANA NO RITEŅKRĒSLA – SĒDUS STĀVOKLĪ

Tikai rokas var būt izstieptas pāri riteņkrēsla sēdeklim. Ķermenim un galvai ir jāatrodas sēdekļa ietvaros.

Jums ir jāatbalstās uz kaut ko un jānoliecas, lai aizsniegtu jūsu priekšā esošo priekšmetu. Pareizai riteņu izlīdzināšanai ir būtiska nozīme jūsu drošībai.

Novietojiet riteņkrēslu pēc iespējas tuvāk vēlamajam priekšmetam, lai jūs viegli varētu to aizsniegt, izstiepjot savas rokas, vienlaikus saglabājot normālu sēdus stāvokli. Jūs nedrīkstat liekties atpakaļ, jo riteņkrēsls var apgāzties. (Att. Nr. 2)



Att. Nr. 2



## UZBRAUKŠANA UZ IETVES


Iesakām izmantot palīgu, lai uzbrauktu uz ietves. Vispirms pavadošā persona novieto riteņkrēslu tieši pretī ietves malai. Tad atliec riteņkrēslu atpakaļ, līdz stūrējamie riteņi skar ietves malu. Visbeidzot, stumj riteņkrēslu tieši uz priekšu, līdz aizmugurējie riteņi skar apmali, un tad atkal pastumj riteņkrēslu, līdz aizmugurējie riteņi šķērso ietves malu. (Att. Nr. 3)



Att. Nr. 3



## PĀRSĒŠANĀS

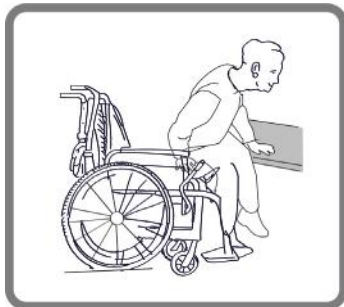

Att. Nr. 4

Ja jums ir pietiekami daudz spēka, pārsēšanos varat veikt vienaatnē. Vispirms novietojiet riteņkrēslu pēc iespējas tuvāk vietai, uz kuru vēlaties pārsēsties, līdz ar to stūrējamie riteņi ir pavērsti uz priekšu. Ieslēdziet fiksēšanas bremzi un pārvietojiet savu ķermeni vajadzīgās vietas virzienā. Ja pārvietojoties jums apakšā nav nekāda atbalsta, ja iespējams, izmantojiet dēli. Salociet uz augšu kāju balstus un atlieciet tos malā, lai atbrīvotu vietu. Nolieciet ķermeni uz priekšu, vienlaikus balstoties uz abiem roku balstiem, un piecelieties. Tad pārvietojiet ķermeni uz vietu, kur vēlaties sēdēt, sadalot savu svaru uz rokām un plaukstām

Ja jūs pats/-i spējat piecelties un stāvēt, jūs varat mainīt sēdvietas, noliecoties uz priekšu. Ja jums ar šo kustību ir problēmas, iesakām lūgt pavadošās personas palīdzību, lai nodrošinātu vieglu un drošu pārsēšanos. Vispirms ieslēdziet abas bremzes un pārliecinieties, ka abi stūrējamie riteņi ir pavērsti uz priekšu. Atcerieties, ka jūs nedrīkstat atbalstīties uz bremzēm.

Stingri satveriet roku balsta rokturi un atbalstieties uz rokām, lai būtu viegli piecelties (pirms tam pārliecinieties, ka roku balsts ir droši nostiprināts savā vietā). Palīgs var jums palīdzēt pabeigt pārsēšanos. Novietojiet sevi cik vien tuvu iespējams vajadzīgajai vietai. Mainot stāvokli, sēdiet pēc iespējas tālu atpakaļ, lai nesalauztu skrūves un nesabojātu sēdekļa spilvenus, kā arī lai novērstu riteņkrēsla apgāšanos. Ieslēdziet abas bremzes; šīs bremzes nekādā gadījumā nedrīkst izmantot ka atbalstu, lai pārsēstos. Nekad neatbalstieties uz kāju balstiem, sēžot vai ceļoties augšā.



## KĀPNES

Iesakām izmantot divu cilvēku palīdzību, no kuriem vienam jāatrodas riteņkrēsla priekšpusē, bet otram aizmugurē, jo kāpņu pārvarēšana ir sarežģītāka un bīstamāka. Cilvēks, kurš atrodas riteņkrēsla aizmugurē, atliec riteņkrēslu atpakaļ, līdz tas atrodas līdzsvarā. Tad stumj riteņkrēslu pret pirmo pakāpienu, stingri satverot rokturi, lai sagatavotos pacelt riteņkrēslu. Cilvēks, kurš atrodas riteņkrēsla priekšpusē, satver rāmja malas riteņkrēsla priekšpusē un paceļ riteņkrēslu pāri pakāpienam, kamēr otrs palīgs uzkāpj uz nākamā pakāpiena, atkārtotot sākotnējās darbības. Nenolaidiet riteņkrēslu, kamēr neesat pārvarējis riteņkrēsla priekšpusē esošā cilvēka pēdējo pakāpienu. riteņkrēsla nešana lejā pa kāpnēm notiek tieši tāpat, kā iepriekš aprakstīts, tikai apgrieztā secībā. (Att. Nr. 5)



Att. Nr. 5



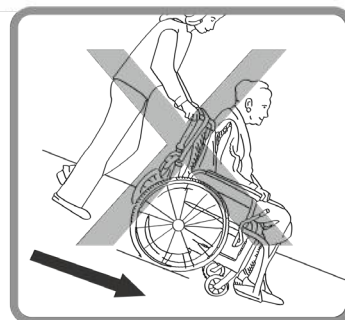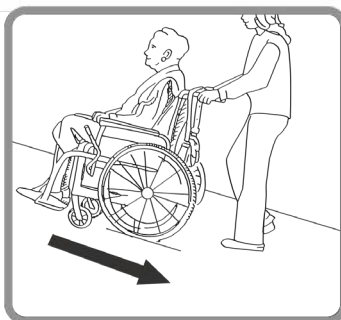





## PACEĻOT / NOLAIŽĪTIES NO RAMPAS



## DROŠĪBA



- Izvēlaties drošu ātrumu braucot pa slīpumu. Izvairāties no braukšanas pa stāvām nogāzēm. Nelietojiet funikulierus. Nebrauciet atmuģuriski.
- Riteņkrēsls ir paredzēts tikai vienai personai.
- Braucot kājas turiet uz kāju atbalsta. Nestāviet uz kāju atbalsta. Sēdiet taisni riteņkrēslā, saglabājiet līdzsvaru. Ieteicams saglabāt ķermeņa svara centru uz sēdekļa.
- Ieteicams apspriesties ar ārstējošo ārstu, kā ērtāk apsēsties riteņkrēslā vai izkāpt no tā. Stāvbremzēm jābūt ieslēgtām gan apsēžoties riteņkrēslā, gan izkāpjot no tā. Riteņkrēsla stāvbremzes nav paredzētas ātruma mazināšanai, tās var ieslēgt tikai tad, kad riteņkrēsls ir pilnīgi apstājusies.
- Esiet uzmanīgi lietojot riteņkrēslu, izvairāties no šķēršļiem: šaurām durvīm, kāpnēm, sadzīves lietām, bērnu rotaļlietām. Nesniedziet lietas, ko nevarat sasniegt ar roku.

-  • **Uzmanību!** Neceliet riteņkrēslu turot to uz noņemamām detaļām. Pretējā gadījumā iespējams savainot lietotāju vai sabojāt riteņkrēslu.
-  • **Uzmanību!** Aizliegts braukt pa apledojošo nogāzi vai nokalni.
-  • **Uzmanību!** Aizliegts braukt pāri šķēršļiem un ceļa negludumiem. Pretējā gadījumā iespējams lietotājs var savainoties vai sabojāt riteņkrēslu.
-  • **Uzmanību!** Aizliegts atstāt riteņkrēslu nogāzē vai nokalnē, vai jebkurā citā vietā, kur tas varētu traucēt garāmgājējiem vai radītu tiem draudus.
-  • **Uzmanību!** Aizliegts bremzēt braucot lejup pa nogāzi. Pretējā gadījumā iespējams lietotājs var savainoties vai sabojāt riteņkrēslu.
-  • **Uzmanību!** riteņkrēslu remontu, tīrīšanu vai pielāgošanu veic pilnvarota servisa persona, kamēr otra persona neatrodas krēslā.
-  • **Uzmanību!** Aizliegts riteņkrēslu lietot personām, kas sver vairāk nekā norādīts lietošanas instrukcijā.
-  • **Uzmanību!** riteņkrēsls nedrīkst ilgstoši atrasties temperatūrā, kas pārsniedz +40°C. Pretējā gadījumā rāmis, kā arī sēdekļis, atzveltne un roku balsti var sakarst un radīt apdegumus.

## APSTRĀDES BĪSTAMĪBA



Montāžas, lietošanas, pārkraušanas, kā arī riteņkrēsla noregulēšanas laikā var notikt lietotāja ķermeņa iesprūšana, (vadošās personas ķermeņa caurumu (starpā) starp riteņkrēslu elementiem aizķeršana un (vai) saspiešana). Mēs iesakām visas iepriekš minētās darbības veikt īpaši piesardzīgi, pēc jebkuras riteņkrēsla elementu noregulēšanas un, lai saglabātu noregulētos elementus savā vietā, uzmanīgi pievelciet uzgriežņus (skrūves).

## RITEŅKRĒSLA PACELŠANA



Pirms riteņkrēslu pārvadāšanas, lūdzu, pārliecinieties, ka visas noņemamās daļas ir noņemtas. Noņemamās daļas riteņkrēslā var būt roku balsts, kāju balsts, aizmugurējie riteņi un spilveni. Kā tos noņemt, lūdzu, skatiet šo rokasgrāmatu. Pēc detaļu noņemšanas, lūdzu, salieciet riteņkrēslu. Pēc tam, kad tas ir salikts, to var viegli pacelt ar abām rokām turot rāmi. Pacelšanas svars pēc visu detaļu izņemšanas ir aptuveni 8-10 kg atkarībā no krēsla izmēra un modeļa.

## RIEPAS



Krēsla priekšējie riteņi ir cieti (PU). Aizmugurējie riteņi ir pneimatiski. Ieteicamais gaisa spiediens ir norādīts uz riepas. Drošības labā regulāri pārbaudiet gaisa spiedienu riepās. Ja pamanāt, ka gaisa spiediens ir zems, lūdzu, papildiet tos, izmantojot sūkni, kas ir iekļauts komplektā. Gadījumā, ja riepas neiztur ārējo riepu gaisu vai acīmredzamu nodilumu, nekavējoties jāinformē servisa uzņēmumu. Riteņkrēslu izmantošana ar tukšām gaisa riepām ir aizliegta!

## BRĪDINĀJUMS PAR SĪKĀM DETALĀM



Lūdzu, pasargājiet bērnus līdz piecu gadu vecumam no vieglas piekļuves riteņkrēslam. Konstrukcijā izmantoto mazo elementu dēļ bērni tos var norīt un nosmakt.

## TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA



Lai notīrītu rāmi, kā arī plastmasas daļas, izmantojiet mitru drānu. Iespējams arī izmantot saudzējošo mazgāšanas līdzekli, lai notīrīt grūti noņemamus netīrumus. Riteņus var notīrīt ar mitru sintētisko birsti (nedrīkst izmantot metālisku birsti). Sēdekļa un muguras spilvenus var mazgāt. Izmantojiet saudzējošo mazgāšanas līdzekli. Izmantojiet parastos, neagresīvos dezinfekcijas līdzekļus. Ja neesat pārliecināts, vai lietojamais līdzeklis ir piemērots dezinfekcijai, sazinieties ar vietējo izplatītāju.

## DAŽĀDU LIETOTĀJU RITEŅKRĒSLA IZMANTOŠANA



Riteņkrēslu var izmantot arī citi. Lai to izdarītu, riteņkrēsls ir rūpīgi jāiztīra un jādezinficē. Visas riteņkrēsla sastāvdaļas ir jāpārbauda pilnvarotam servisa pārstāvim uz vispārējo tehnisko stāvokli, nodilumu un nepieciešamības gadījumā jāveic remonts.

## UTILIZĀCIJAS INSTRUKCIJA



Riteņkrēsla ekspluatācijas laiks pareizas lietošanas un apkopes gadījumā ir 5 gadi. Pēc tam riteņkrēsls ir jāpārstrādā. Neizmetiet riteņkrēslu kopā ar parastiem atkritumiem. Lai atkārtoti pārstādāt riteņkrēslu, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašpārvaldi, pārstrādes centru vai mūsu servisa nodaļu.

## TRANSPORTĒŠANA



- Lai garantētu drošību un novērstu bojājumus pārvadāšanas laikā, visas noņemamās daļas (roku balsti, kāju balsti, aizmugurējie riteņi) ir jānoņem.

## UZKOPŠANA




- Pirms lietojiet, pārbaudiet stāvbremzes.
- Riteņkrēsls ir jāuzglabā sausā vietā, izvairoties no tiešiem saules stariem. Aizsargāt pret putekļiem un periodiski tīrīt. To var izdarīt ar putekļu vai mitru lupatiņu un maigu tīrīšanas līdzekli. Tīrīt regulāri, izmantojot neitrālu mazgāšanas līdzekli un siltu ūdeni. Lūdzu, pārbaudiet piemērotību tīrīšanas vai mazgāšanas līdzeklim pirms lietošanas. Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, tas var neatgriezeniski sabojāt virsmu un anulēt garantiju.
- Riteņkrēslam jāveic regulārā pārbaude, lai tiktu nodrošināta drošība un ērtība. Nolietojušajām riteņkrēsla detaļām, kas nav derīgas vai drošas lietošanai, jābūt nomainītam vai saremontētam.

## REZERVES DAĻAS



- Veicot riteņkrēsla remontu, var tikt izmantotas tikai oriģinālas ražotāja daļas. Ja vēlaties saņemt oriģinālo daļu, iesniedziet liplentē norādīto riteņkrēsla veidu un sērijas numuru tirdzniecības vietā jeb sazināties ar ražotāju. Ražotājs un izplatītājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radās izmantojot neoriģinālas rezerves daļas vai veicot remontu neautorizētajā servisa centrā.

## ROKU ATBALSTI

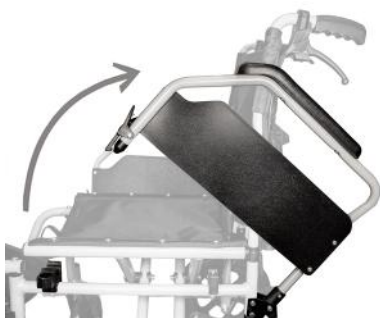

Att. Nr. 6

Riteņkrēsla roku atbalstus iespējams pacelt. (Att. Nr. 6) Ja vēlaties roku atbalstus pacelt, nospiediet plastmasas turekļi un pavelciet atbalstu uz augšu. Ieteicams pacelt atbalstu apsēžoties riteņkrēslā/stājoties no riteņkrēsla no sāna. Braucot ar riteņkrēslu, roku atbalstam jābūt fiksētam.

## BREMZES



Att. Nr. 7

Jūsu riteņkrēslam bremzes ir uzstādītas abās rāmja pusēs. Pēc piegādes bremzes tiek pienācīgi noregulētas, lai nodrošinātu pietiekamu bremsēšanu. Lai iedarbinātu bremzes, satveriet bremžu sviru un spiediet to uz priekšu. Iesakām vienmēr izmantot abas bremzes vienlaicīgi, lai nodrošinātu maksimālu drošību. Aizmugurējā riteņa normāla nodiluma dēļ, bremžu efektivitāte var samazināties. Lai nodrošinātu pietiekamu bremsēšanu, ir jānoregulē bremžu novietojums. Lai to izdarītu, ar sešskaldņu atslēgu atgrieziet divas skrūves bremžu apakšējā daļā. Tad pastumiet to uz priekšu vai atpakaļ un pievelciet skrūves.

Ja jūs pagriežat aizmugurējā riteņa adapteri par 180°, lai paplašinātu aizmugurējā riteņa bāzi, ir nepieciešams pārvietot bremzes. Izmantojiet sešskaldņu atslēgu lai atskrūvētu bremžu iekārtu, pastumiet to atpakaļ un atkal pievelciet. (Att. Nr. 7)


## AIZMUGURĒJĀS BREMZES



Att. Nr. 8

LightMan Travel ir aprīkots ar bremzi otrai personai, kuru drīkst darbināt tikai pavadošā persona, izmantojot bremžu sviru, kas atrodas uz rokturiem. Būgū bremzēs kā arī darba bremzes nodrošina ļoti labi kontrolējamu palēnināšanu. Bremžu bloķēšanas funkcija un jāizmanto pie krēsla novietošanas. Lai nobloķētu bremzi, aizstiepiet aiz bremžu svirām un platību. Lai atbloķētu bremzes, maigi aizstiepiet bremžu sviras uz augšu un bremžu mehānismiem. Maksimālā bremzēšanas efektivitāte ir regulējams ar skrūvi. Izskrūvējot skrūvi bremzēšanas spēkus palielinot, aizskrūvējot - samazinās. (Nr. 8)

## KĀJU ATBALSTI

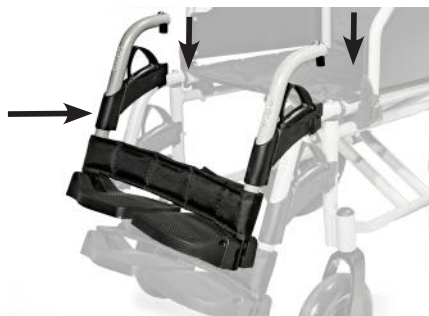

Att. Nr. 9

Kāju atbalsti tiek piegādāti iepakoti atsevišķā nelielā kartona kastē. Lai tos uzstādītu, izņemiet tos ārā no iepakojuma. Kāju atbalsti ir jāuzstāda riteņkrēsla priekšpusē. Vispirms ievietojiet plastmasas detaļu metāla caurulē un nospiediet to uz leju. Tad virziet iekšā kāju atbalstu, kamēr sadzirdat klikšķi. Kad kāju atbalsts ir nostiprināts savā vietā, tas turas stingri. (Att. Nr. 9) Nesajauciet kreiso un labo kāju atbalstu! Pēc uzstādīšanas plastmasas paliktnim ir jābūt vērstam uz iekšu. Atstājot riteņkrēslu, kāju atbalsts ir jāpagriež projām vai arī pilnībā jānoņem. Pavelciet plastmasas sviru uz augšu un izņemiet ārā kāju atbalstu. Kāju atbalsta garumu var regulēt, lai pielāgotu lietotāja vajadzībām. Vispirms atgrieziet skrūvi ar sešskaldņu atslēgu, izvelciet skrūvi ārā un atkal to pieskrūvējiet vajadzīgajā stāvoklī.



## GARANTIJAS NOSACĪJUMI

- Palīglīdzeklim garantija tiek piešķirta uz 24 mēnešiem no iegādāšanas datuma. Ražotājs un izplatītājs uzņemas atbildību tikai par defektiem, kas radās saistībā ar ražošanas procesu vai sliktas kvalitātes materiāliem. Ražotājs un izplatītājs neuzņemas atbildību par defektiem:

- kas radās palīglīdzekli lietojot neatbilstoši paredzētajam mērķim vai neievērojot lietošanas un kopšanas instrukciju; - kas radās lietojot neoriģinālas ražotāja detaļas vai remontējot palīglīdzekli ražotāja neapstiprinātā vietā;

- kas radās saistībā ar dabas stihijām vai lietotāja kompetences trūkumu un piesardzības dēļ.

Garantija ir spēkā tikai tad, ja tika uzpildīta garantijas karte. UAB „Kasko Group” pārstāvis izvērtē preces bojājumu un informē, vai tas ir garantijas gadījums. Ja tas ir garantijas gadījums, UAB „Kasko Group” nolemj, vai prece jāremontē, vai jānomaina ar jaunu preci. Preces saremontēšana

nepagarina garantijas termiņu. Garantijas apkalpošanas termiņš – 4 nedēļas no dienas, kad preci saņēma UAB „Kasko Group”. Ja tas nav garantijas gadījums, visus remonta izdevumus sedz pircējs.

**SPECIFIKACIJAS**

Sėdekļa platums	360 mm	380 mm	410 mm	430 mm	460 mm	480 mm	510 mm
Lightman Travel	04-018-2/36	04-018-2/38	04-018-2/41	04-018-2/43	04-018-2/46	04-018-2/48	04-018-2/51
Kopējais garums	1050 mm						
Kopējais platums	Sėdekļa platums + 180 mm						
Kopējais augstums	930 mm						
Sėdekļa dziļums	420 mm						
Sėdvietas augstums	480 mm Bez spilvena 520 mm (Ar spilvenu )						
Atzveltnes augstums	450 mm						
Kāju atbalsta garums	340-450 mm						

Elkoņbalsta augstums	250 mm (Bez spilvena ); 200 mm (Ar spilvenu )						
Priekšējo riteņu izmērs	190 x 50 mm						
Aizmugurejo riteņu izmērs	310 mm						
Svars	13,2 kg	13,4 kg	13,6 kg	13,8 kg	14,0 kg	14,2 kg	14,4 kg
No kurām kāju balsti	1,5 kg						
No kurām spilveni	0,4 - 0,5 kg						
Maksimālā slodze	120 kg						
Rāmis	Alumīnijs						
Apdare	Neilons						

**GARANTIJAS KARTE**

Preces nosaukums	Modelis	Pārdošanas datums (ierakstīt)	Garantijas termiņš
Manuālais pavadoņa vadāmais riteņkrēsls	<input type="checkbox"/> 04-018-2	24	mēneši

Place for SN

Your dealer

Izdevējs

UAB Kasko Group

A. Vivulskio g. 12D, 03221 Vilnius, Lietuva  
Tel. +370 52167425 • Faks. +370 52167425

www.kid-man.eu • info@kid-man.com

Datum / 2019-03-18

Izdevuma datums 2019-03-18

